

創茂優益採[®] 子宮頸 樣品採集管 (未滅菌) 使用說明書

Zinexts UniColl[®] Cervical Sample Collection Tube (Non-sterile) Instructions for use

使用前請務必詳閱產品使用說明書並遵照指示使用

產品型號及規格：

| 型號 | 描述 | 材質 | 長度(mm) | 寬度(mm) |
|---------|----------|-------|--------|----------------------|
| 511F101 | 子宮頸樣品採集管 | PE/PP | 122±1 | 35±1 (蓋) 28.5±1 (管身) |

組成：樣品採集管、保存液

用途：本採集管內含保存液，用於收集人類子宮頸檢體，作為微生物相關檢測的檢體收集及運送容器。

使用方式：

1. 在採集管上填寫姓名與採檢資訊 (如 ID 號碼)。
2. 拉開並移除固定封環，打開採集管上蓋 (逆時針旋開) (圖 1)。
3. 請依照子宮頸採樣刷的指示進行採樣。採樣後，將採樣刷的前端放入採集管的底部，使採樣刷的刷毛完全浸泡於保存液中。(請避免刷毛接觸到採集管的外部。)
4. 將前端刷毛在保存液中旋轉壓擠 10 下，使檢體樣本能與保存液混合(圖 2)。
5. 在管壁上將刷毛的保存液擠乾，移除採檢刷，將上蓋順時針旋緊(圖 3)。



圖 1



圖 2



圖 3

運送及保存條件：

1. 運送條件: 室溫運送。
2. 無檢體時保存條件與期限: 15-30°C，依管身標示。
3. 檢體採集後保存條件與期限：4-37°C，3 週。

警告事項：

1. 本採集管為單次性商品，不得重複使用。
2. 本採集管外觀如有破損及漏液之情況發生，請勿使用。

許可證字號：衛部醫器製壹字第 010231 號

醫療器材商名稱：創茂生技股份有限公司

醫療器材商地址：新北市汐止區新台五路一段 93 號 16 樓

製造業者名稱：創茂生技股份有限公司汐止三廠

製造業者地址：新北市汐止區新台五路一段 95 號 12 樓-12